




MANUALE UTENTE

Baffin neoSIT BASIC

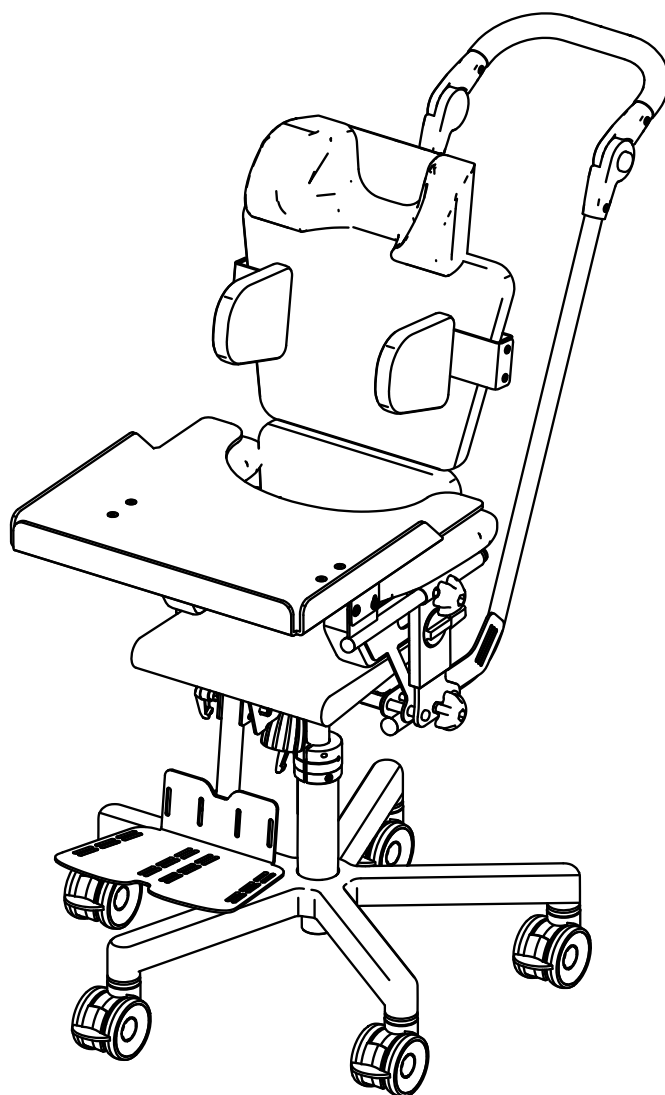

Edizione 1 - 04.01.2023



NOTE! IL FORNITORE SI RITIENE RESPONSABILE SOLAMENTE PER I PRODOTTI VENDUTI TRAMITE IL SUO DISTRIBUTORE LOCALE O TRAMITE CENTRI MEDICI SPECIALIZZATI CHE RAPPRESENTANO LIW CARE TECHNOLOGY ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLA POLONIA.



NOTE! ESISTE IL RISCHIO CHE UNA PARTE DEL CORPO DELL'UTENTE/ACCOMPAGNATORE POSSA RIMANERE INTRAPPOLATA E/O SCHIACCIATA NEI FORI/SPAZI TRA I SINGOLI ELEMENTI DURANTE L'USO DEL PRODOTTO, NONCHÉ DURANTE L'ASSEMBLAGGIO E LA REGOLAZIONE DEI MECCANISMI DEL PRODOTTO. QUESTE PARTICOLARI PROCEDURE DEVONO ESSERE ESEGUITE CON PARTICOLARE CAUTELA. UNA VOLTA ESEGUITE TUTTE LE REGOLAZIONI, È FONDAMENTALE STABILIZZARE LA POSIZIONE SERRANDO CORRETTAMENTE DADI/VITI.



NOTE! È ESSENZIALE LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO.

Contents

Sommario

1	Introduzione.....	4
2	Condizioni generali di sicurezza	4
3	Uso previsto	4
4	Identificazione dei simboli	5
5	Conformità ai requisiti relativi ai dispositivi medici	5
6	Utilizzo del Baffin neoSIT BASIC	5
7	Informazioni tecniche	6
8	Componenti principali del Baffin neoSIT BASIC	7
9	Trasportare Baffin neoSIT BASIC	8
10	Impostazioni e regolazioni Baffin neoSIT BASIC.....	8
10.1	Maniglione di spinta.....	8
10.2	Freni	9
10.3	Impostazioni e regolazioni	10
10.3.1	Regolazione della larghezza.....	10
10.3.2	Regolazione dell'altezza dei braccioli	10
10.3.3	Regolazione della profondità.....	10
10.3.4	Regolazione poggiapiedi	10
10.3.5	Poggiapiedi separati	11
10.3.6	Regolazione del basculamento della seduta	11
10.3.7	Regolazione dell'altezza della seduta	11
10.3.8	Regolazione dell'altezza del supporto glutei	11
10.3.9	Regolazione dell'inclinazione dello schienale.....	11
10.3.10	Impostazioni e regolazioni del tavolino	12
11	Funzionalità aggiuntive	13
11.1	Poggiatesta anatomico	13
11.2	Poggiatesta.....	13
11.3	Supporti laterali al tronco	14
11.4	Regolazione angolazione ed altezza dei supporti schienale superiore ed inferiore	14
11.5	Fissaggio e regolazione del bretellaggio, delle cinture abduttrici e pelviche	14
12	Pulizia e manutenzione	15
13	Etichetta.....	16
14	Assistenza e manutenzione.....	17

1 Introduzione

Il sistema BAFFIN neoSIT BASIC è stato progettato e sviluppato dall'azienda LIW Care Technology SP. Z.o.o.. È un innovativo dispositivo dotato di funzionalità all'avanguardia per la regolazione in funzione delle caratteristiche anatomiche del paziente. Rappresenta un'alternativa sia ai sistemi di seduta standard con possibilità di regolazione limitate, sia a quelli personalizzati che, pur adattandosi alle curve del corpo dell'utente, offrono poche regolazioni aggiuntive.

È stato fatto ogni sforzo per garantire che il dispositivo sia facile da usare e da regolare, offrendo al contempo numerose possibilità di adattare il sedile alla forma anatomica del corpo.

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'utilizzo. È importante osservare le linee guida e le raccomandazioni per assicurare sicurezza e confort all'utilizzatore e agli assistenti e per evitare di danneggiare il dispositivo. Se il dispositivo è utilizzato da diversi o nuovi assistenti, è necessario che essi siano adeguatamente formati sul suo utilizzo, che abbiano a disposizione una copia di questo documento e siano informati sul luogo in cui è custodito per poterlo consultare. Per una formazione completa sull'utilizzo del dispositivo contattare il distributore per l'Italia.

2 Condizioni generali di sicurezza

La sicurezza di coloro che utilizzano i nostri prodotti è di fondamentale importanza per LIW Care Technology Sp. z o.o. Per la sicurezza e il comfort durante l'utilizzo di BAFFIN neoSIT Basic e per evitare il rischio di danni all'apparecchiatura, è molto importante leggere queste istruzioni prima dell'uso e assicurarsi che le raccomandazioni e le avvertenze siano lette e comprese dall'utente e/o da qualsiasi altra persona coinvolta nell'utilizzo dell'apparecchiatura.

Sicurezza ed utilizzo non idoneo:

- Non apportare alcuna modifica che potrebbe compromettere la sicurezza del dispositivo.
- Il dispositivo identificato in questo manuale deve essere utilizzato esclusivamente secondo le modalità qui descritte.
- Effettuare immediatamente le eventuali riparazioni richieste.
- Nel caso in cui vengano apportate modifiche al prodotto che ne possano compromettere la sicurezza, la persona che ha apportato tali modifiche può esserne ritenuta responsabile. Il fabbricante ed il distributore non saranno ritenuti responsabili per le modifiche effettuate sui prodotti dopo la loro consegna.



NOTA! Fare attenzione a questo simbolo. Esso evidenzia punti specifici relativi alla sicurezza. La mancata osservanza di queste istruzioni comporta il rischio di lesioni all'utilizzatore o all'assistente.

Transporto:

L'utilizzatore non può essere trasportato all'interno di un veicolo sul BAFFIN neoSIT.

Assistenza e manutenzione:

È importante sottoporre il BAFFIN neoSIT ad assistenza e manutenzione regolari. Si veda la sezione relativa alla manutenzione in questo manuale.

Spostamento in aeroplano:

Nel caso in cui si debbano effettuare spostamenti aerei con il proprio Baffin neoSIT BASIC, sia chiuso o aperto, è necessario che esso sia ben protetto, imballato e fissato.

3 Uso previsto




Il sistema Baffin neoSIT BASIC è destinato ad utilizzatori con un'altezza compresa tra 85 e 135 cm ed un peso massimo di 60 kg. Il sistema Baffin neoSIT BASIC è destinato solamente all'utilizzo in ambienti chiusi. Il sistema Baffin neoSIT BASIC è destinato ad utilizzatori con problemi di postura, disfunzioni muscolari, patologie particolari incluse la paralisi cerebrale, la distrofia muscolare, paralisi di vario tipo, tetra e paraplegia. Può essere usato nella terapia per aiutare a prevenire le conseguenze negative dei difetti posturali sul corpo. Una caratteristica innovativa della seduta Baffin neoSIT è rappresentata dal fatto che esso "cresce" con il bambino in quanto può essere regolato sulla base della posizione e dell'altezza del bambino.

In caso di dubbi e domande, contattare il proprio rivenditore di fiducia o il distributore per l'Italia:

Bodytech srl – Via Pratolino snc – 19037 Santo Stefano Magra (SP)



4 Identificazione dei simboli

	Nome del produttore
	Data di produzione
	Numero di serie
	Peso max dell'utente
	Evitare il contatto con l'acqua
	Seguire le istruzioni d'uso
	Freccia che indica la direzione del moto
	Certificato di conformità secondo il Regolamento (EU) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, Allegato V.
	Dispositivo medico

5 Conformità ai requisiti relativi ai dispositivi medici

Con la presente, confermiamo che il dispositivo Baffin neoSIT BASIC soddisfa i requisiti del Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Aprile 2017 relativo ai dispositivi medici.

Il Baffin neoSIT BASIC, in accordo con l'allegato VIII del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (EU) 2017/45, datato 5 Aprile 2017 e che riguarda i dispositivi medici, è un dispositivo medico non invasivo di Classe I, secondo la regola 1.

E' possibile richiedere la Dichiarazione di Conformità del dispositivo presso il dipartimento commerciale del produttore.

6 Utilizzo del Baffin neoSIT BASIC

Baffin neoSIT BASIC è destinato ai pazienti le cui condizioni rendono impossibile sedersi senza assistenza.



NOTA! L'utilizzo del dispositivo è previsto per una sola persona alla volta.



NOTA! Il dispositivo deve essere caricato solo all'interno del range di peso consentito; l'aggiunta di qualsiasi oggetto, appoggiato sul dispositivo, può causare la caduta del dispositivo stesso.



NOTA! Le impostazioni estreme e la postura sfavorevole (inclinazione eccessiva) aumentano il rischio di caduta.



NOTA! È vietato sollevare il dispositivo con l'utente seduto al suo interno.



NOTA! E' previsto che il dispositivo si sposti su superfici piane e dure. Il superamento di ostacoli come soglie e spigoli è possibile solo quando il sedile non è occupato e l'utente non è seduto sul dispositivo.

7 Informazioni tecniche

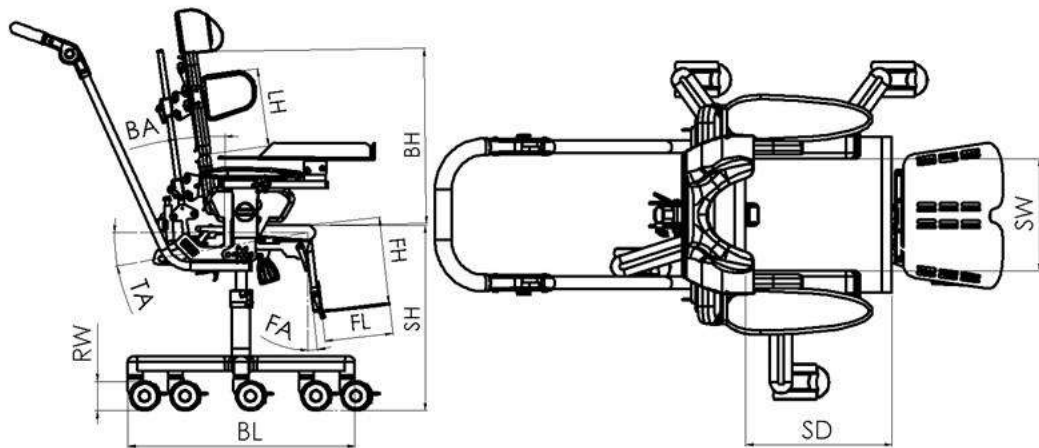


Fig. 1

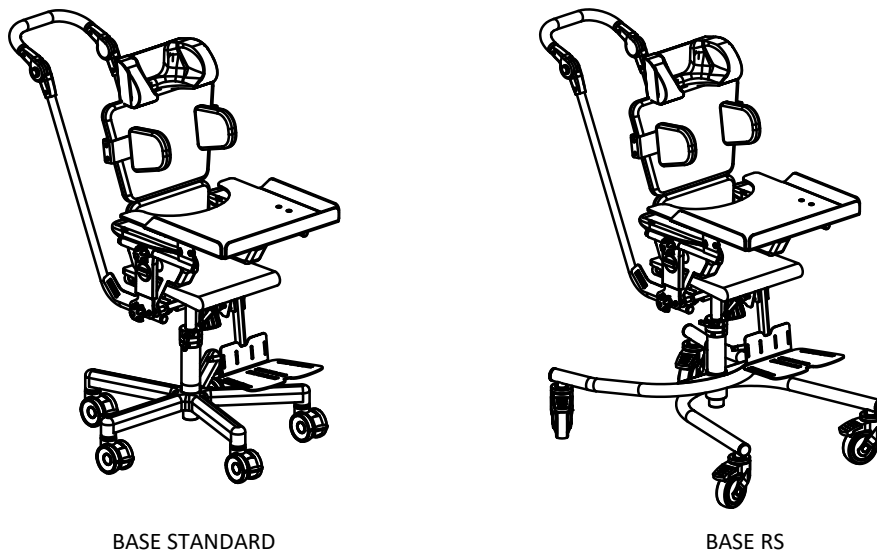


Fig. 2

Fig. 2 mostra le due tipologie di configurazioni possibili del neoSIT BASIC, su base standard e, sulla destra, su quello RS.



Il Baffin neoSIT BASIC è disponibile in tre differenti misure. I dettagli delle misure sono mostrate nella tabella riportata di seguito:

No.	Parametro	Simbolo della dimensione	Dimensione [cm]		
			S	M	L
1	Altezza seduta con telaio standard	SH	42÷55	42÷55	42÷55
	Altezza seduta con telaio RS		46÷59	46÷59	46÷59
2	Altezza schienale	BH	37÷47	42÷58	48÷60
3	Angolo schienale	BA	-5°÷25°	-5°÷25°	-5°÷25°
4	Lunghezza telaio standard	BL	55	55	55
	Dimensioni telaio RS		83x55	83x55	83x55
5	Altezza poggiatesta	FH	17÷27	17÷27	28÷38
6	Lunghezza poggiatesta	FL	18	18	21
7	Diametro delle ruote con telaio standard	RW	7,5	7,5	7,5
	Diametro delle ruote con telaio RS		10	10	10
8	Profondità seduta	SD	16÷31	20÷31	29÷40
9	Larghezza seduta	SW	15÷30	15÷30	20÷32
10	Angolo pedana	FA	-10°÷45°	-10°÷45°	-10°÷45°
11	Angolo basculamento	TA	20°	20°	20°
12	Altezza supporti laterali	LH	16÷35	16÷40	20÷45
13	Peso massimo utente		60kg	60kg	60kg

8 Componenti principali del Baffin neoSIT BASIC

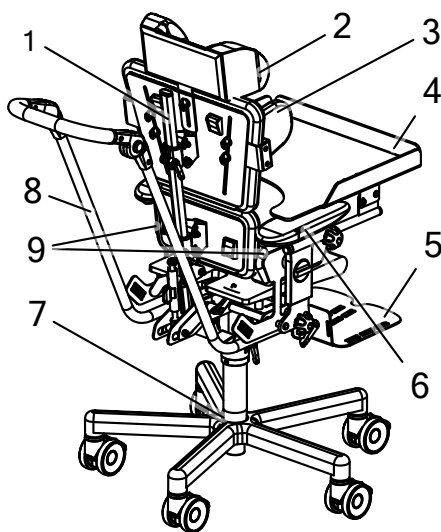


Fig. 3

1. Staffa supporto schienale
2. Poggiatesta
3. Supporti laterali al tronco
4. Tavolino
5. Poggiatesta
6. Bracciolo
7. Telaio a 5 ruote
8. Maniglione di spinta
9. Guide bacino

9 Trasportare Baffin neoSIT BASIC

Per ragione di sicurezza, il Baffin neoSIT BASIC dovrebbe essere trasportato mediante presa in specifici punti. Il modo di trasportarlo è mostrato in Fig.4



NOTA! È vietato trasportare il dispositivo con il paziente seduto al suo interno.

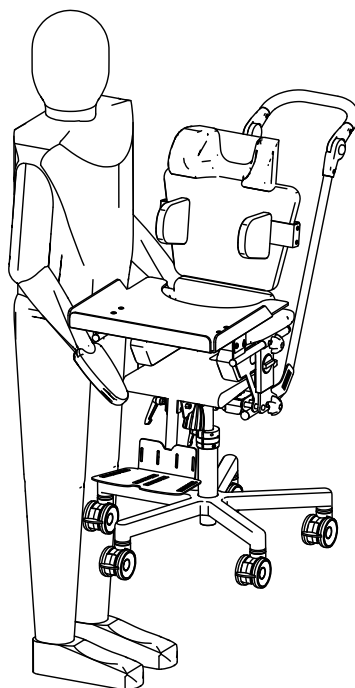


Fig. 4

10 Impostazioni e regolazioni Baffin neoSIT BASIC



NOTA! Dopo ogni procedura di regolazione è fondamentale assicurarsi che tutti gli elementi regolati siano montati e fissati correttamente.

10.1 Maniglione di spinta

Per regolare l'altezza del maniglione, premere i pulsanti (1) e regolare il maniglione all'altezza desiderata per sentire il caratteristico scatto del blocco Fig. 5

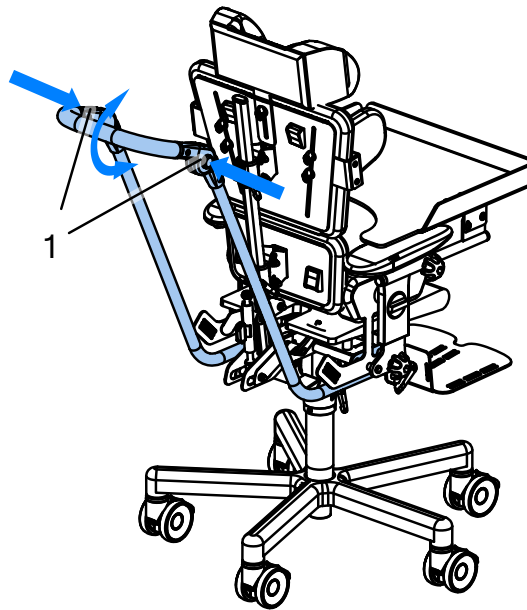


Fig. 5



NOTA! È bene ricordare che qualsiasi oggetto aggiuntivo appeso alla maniglia di spinta influisce notevolmente sulla stabilità dell'apparecchio.

10.2 Freni

Gli elementi di regolazione principali sono mostrati in Fig. 6

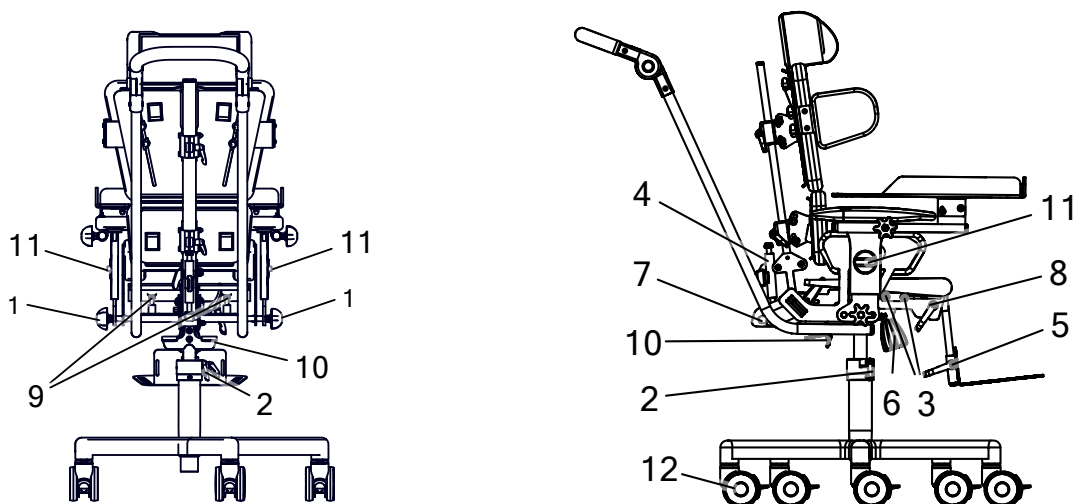


Fig. 6

Per bloccare le ruote, è necessario premere la leva di bloccaggio (12) su ciascuna ruota. Per sbloccare le ruote, alzare la stessa leva (12) su ciascuna ruota. Quando il bambino utilizza il sistema Baffin neoSIT BASIC, tutte le ruote devono essere bloccate.



NOTA! La stabilità dell'apparecchiatura può essere a rischio in caso venga spinto, inclinato o appoggiandosi ad esso.

10.3 Impostazioni e regolazioni

10.3.1 Regolazione della larghezza

Per regolare le guide bacino, è necessario ruotare la manopola (1) a destra o a sinistra fino a che si ottiene la regolazione desiderata. Gli elementi per la regolazione si trovano a sinistra e a destra e permettono il posizionamento simmetrico e asimmetrico del bacino dell'utilizzatore.

10.3.2 Regolazione dell'altezza dei braccioli

Ruotare il pomello (11) Fig. 6 fino al raggiungimento dell'altezza desiderata. I pomelli si trovano sul lato sinistro e destro e funzionano indipendentemente l'uno dall'altro in modo da potere regolare l'altezza dei braccioli in maniera asimmetrica.



NOTA! Questo prodotto può essere impostato e regolato solamente da personale tecnico autorizzato. Le impostazioni e le regolazioni devono essere eseguite da un medico esperto o da personale autorizzato e qualificato.



NOTA! Verificare attentamente che le regolazioni siano corrette:

1. Nessun elemento deve esercitare una pressione eccessiva sul corpo dell'utilizzatore.
2. Tra l'utilizzatore e il dispositivo non vi deve essere uno spazio eccessivo.
3. Le viti e i pomelli di regolazione devono essere nuovamente serrati dopo il completamento del processo di regolazione.

10.3.3 Regolazione della profondità

Per sbloccare/allentare i bulloni (3) posizionati su ciascun lato. Dopo avere allentato le viti, impostare la profondità premendo o tirando il pannello frontale del dispositivo. Per bloccare, serrare i bulloni (3). Se la regolazione non è sufficiente, è possibile incrementarla allentando i bulloni (7) e premendo o tirando lo schienale. Dopo avere completato la procedura di regolazione, assicurarsi che i bulloni (7) siano ben serrati.

10.3.4 Regolazione poggiapiedi

Per regolare l'altezza del poggiapiedi allentare la manopola (1), spostare il poggiapiedi all'altezza desiderata, quindi serrare la manopola (1). Per impostare l'angolo corretto del poggiapiedi, allentare la manopola (2), impostare l'angolo desiderato, quindi serrare la manopola (2) Fig. 8.

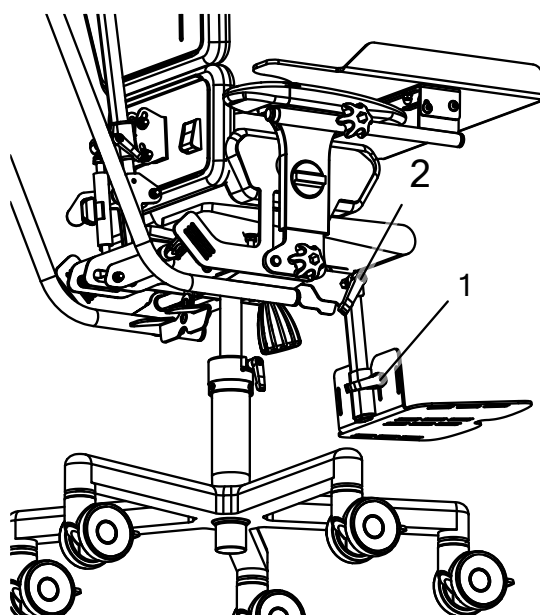


Fig. 7

10.3.5 Poggiapiedi separati

Per regolare l'altezza corretta della pedana allentare entrambe le manopole (1), far scorrere le pedane all'altezza desiderata e stringere le manopole (1). Esse funzionano in modo indipendente l'una dall'altra, consentendo di regolare l'altezza della pedana in modo asimmetrico. Per impostare l'angolo corretto della pedana allentare la manopola dell'angolo (2), impostare l'angolo desiderato e serrare la manopola Fig. 8.

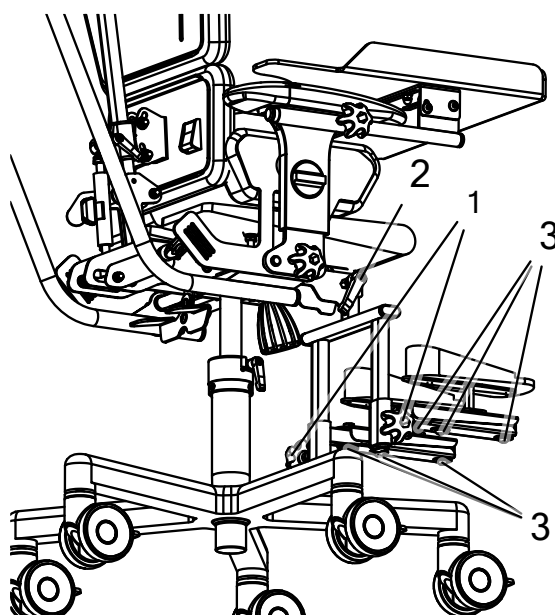


Fig. 8

10.3.6 Regolazione del basculamento della seduta

Ruotare il pomello (6) Fig. 6 fino ad ottenere la posizione desiderata.

10.3.7 Regolazione dell'altezza della seduta

Per aumentare l'altezza della seduta rispetto al pavimento, allentare prima il pomello (2) Fig. 6 e premere la leva del meccanismo di rilascio (10) (verso la parte anteriore del dispositivo). La molla a gas fa automaticamente alzare la seduta. Dopo avere effettuato la regolazione, serrare nuovamente il blocco di rotazione. Per diminuire l'altezza della seduta, allentare il pomello (2) del blocco di rotazione e premere la leva (10), applicando simultaneamente pressione sulla seduta. Impostare l'altezza desiderata e rilasciare la leva (10) per bloccare la seduta nella posizione desiderata. Serrare nuovamente il blocco di rotazione.

10.3.8 Regolazione dell'altezza del supporto glutei

Girare i perni (9) Fig. 6 in senso orario o antiorario fino a che non si ottiene la posizione desiderata.



NOTA! I perni (9) Fig. 6 si trovano nel lato sinistro e destro del dispositivo e sono indipendenti tra loro per garantire una regolazione asimmetrica dei supporti glutei.

Per facilitare la regolazione è possibile rimuovere il rivestimento dalla seduta e potere accedere ai supporti glutei.

10.3.9 Regolazione dell'inclinazione dello schienale

Per modificare l'angolazione dello schienale, la leva (4) Fig. 9 deve essere ruotata e tenuta in quella posizione. Una volta ottenuta manualmente l'angolazione desiderata, rilasciare la leva.

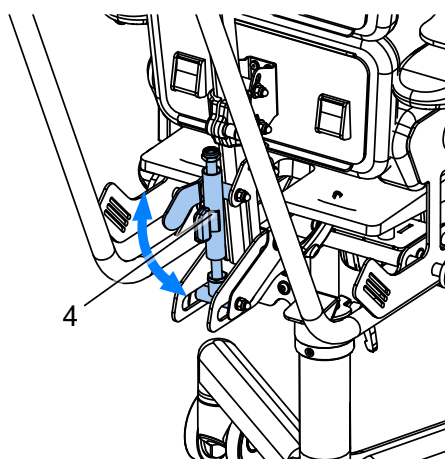


Fig. 9



NOTA! Verificare con precisione che la regolazione sia corretta ed in particolare che:

1. Nessun elemento eserciti una pressione eccessiva sul corpo dell'utente.
2. Non ci sia troppo spazio tra l'utente e il dispositivo.
3. Tutti i bulloni e le manopole di regolazione vengano serrate nuovamente al termine del processo di regolazione.
4. Ci si assicuri che tutte le cinture siano fissate correttamente negli occhielli di fissaggio e che tutte le fibbie del bretellaggio e della cintura pelvica siano fissate correttamente.

10.3.10 Impostazioni e regolazioni del tavolino

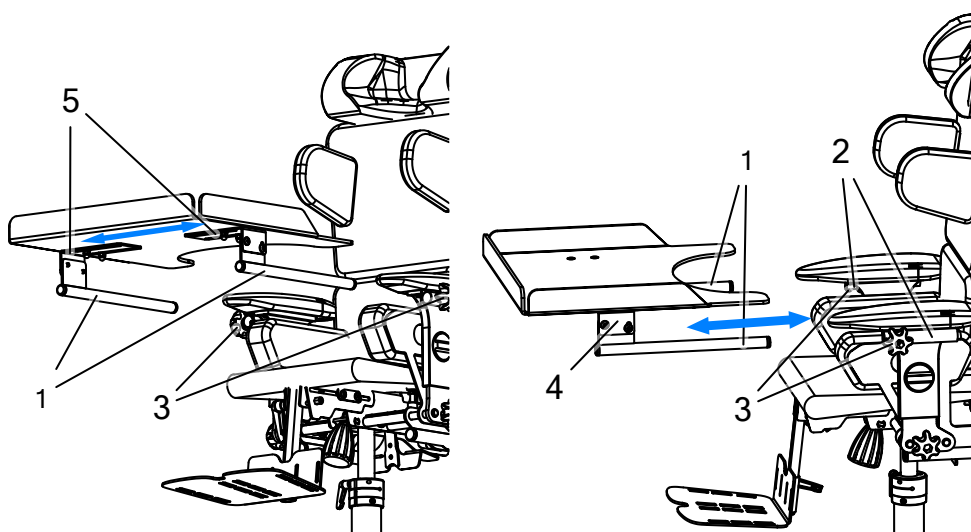


Fig. 10

Per regolare la larghezza dei supporti del tavolino (1) Fig. 10 in funzione alla larghezza degli attacchi sui braccioli (2), allentare i bulloni (5), che si trovano sotto il piano del tavolo. Avvicinare o allontanare le due staffe del supporto in base all'interasse e serrare successivamente i bulloni.

Per montare il tavolino, allentare i pomelli di bloccaggio (3) e fare scivolare i supporti del tavolino (1) negli appositi attacchi che si trovano sotto i braccioli (2). Dopo aver inserito il tavolino alla profondità desiderata, stringere nuovamente i pomelli di bloccaggio (3).

Allentare entrambi i bulloni (4) che si trovano sotto il piano del tavolino stesso (1). Dopo aver impostato l'angolazione richiesta, serrare nuovamente i pomelli della maniglia (4).

11 Funzionalità aggiuntive

11.1 Poggiatesta anatomico

Montaggio poggiatesta Fig. 11

- Rimuovere la vite a farfalla (15).
- Inserire la staffa dell'appoggiatesta (13) nell'apposito spazio del supporto schienale (14).
- Serrare la vite a farfalla (15).

Regolazione dell'altezza dell'appoggiatesta

- Allentare la vite a farfalla (15).
- Posizionare il poggiatesta all'altezza desiderata.
- Serrare la vite a farfalla (15).

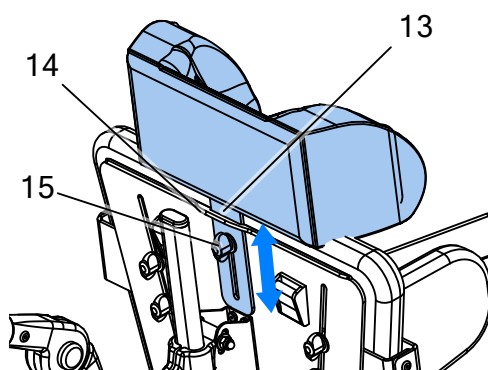


Fig. 11

11.2 Poggiatesta

Montaggio poggiatesta (1) Fig. 12

- Allentare la maniglia (2).
- Inserire il giunto di collegamento poggiatesta (3) nella staffa schienale (5).
- Serrare la manopola (2).

Regolazione dell'altezza dell'appoggiatesta (1)

- Allentare la maniglia (4).
- Posizionare il poggiatesta all'altezza desiderata.
- Serrare la maniglia (4).

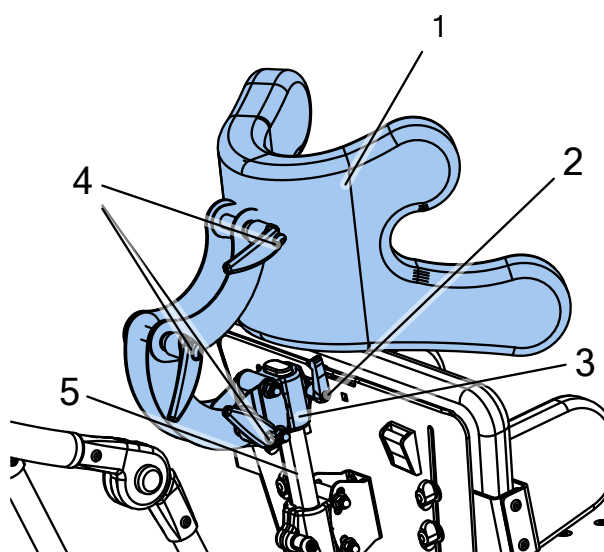


Fig. 12

11.3 Supporti laterali al tronco

Montaggio dei supporti laterali al tronco Fig. 13

- Inserire la staffa (16) tra il supporto schienale e l'imbottitura schienale all'altezza delle asole verticali (17).
- Serrare i bulloni di fissaggio con dadi ad alette (18).

Regolazione larghezza ed altezza dei supporti laterali al tronco

- Allentare i dadi ad alette (18).
- Scorrere le staffe dei supporti laterali al tronco fino a che non si ottiene la larghezza e l'altezza desiderata.
- Stringere i dadi ad alette (18).

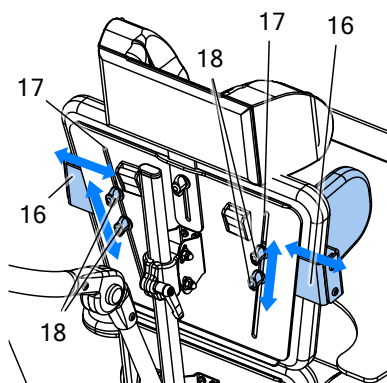


Fig. 13

11.4 Regolazione angolazione ed altezza dei supporti schienale superiore ed inferiore

Regolazione Fig. 14

- Allentare la manopola (20).
- Scorrere verticalmente il giunto fino ad ottenere l'altezza desiderata.
- Stringere la manopola (20).
- Allentare i dadi (19) e bulloni (19).
- Modificare l'angolazione del pannello superiore ed inferiore dello schienale.
- Stringere i dadi (19) ed i bulloni (19).

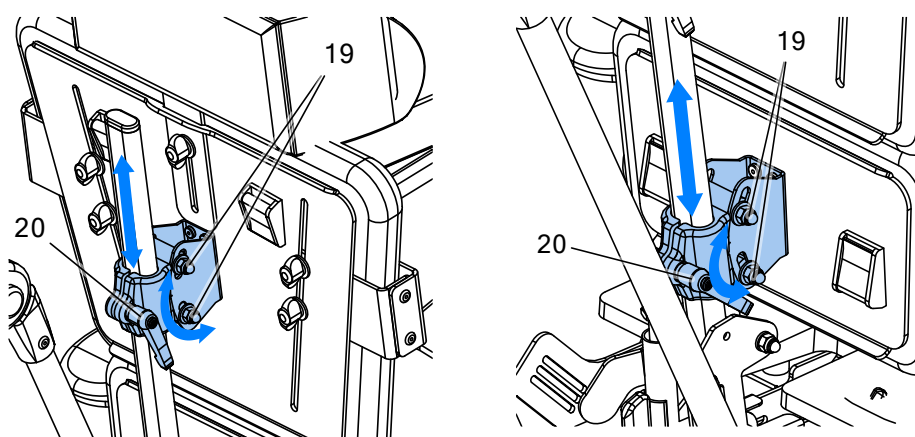


Fig. 14

11.5 Fissaggio e regolazione del bretellaggio, delle cinture abduttrici e pelviche

Il bretellaggio e le cinture pelviche vengono montate sull'ausilio attraverso l'uso di cinghie Fig. 15. Per sistemare il bretellaggio correttamente, far passare le cinghie attraverso le fibbie (21) and (22). La lunghezza delle cinture può essere regolata facendo passare le cinture attraverso le fibbie sullo schienale o attraverso le fibbie che fissano le cinture al bretellaggio. Le cinture pelviche sono bloccate nelle asole presenti nelle staffe che supportano anche le guide bacino (23). La lunghezza delle cinture è regolabile facendo passare le cinghie (allentandole o stringendole) attraverso le fibbie o le asole di fissaggio.

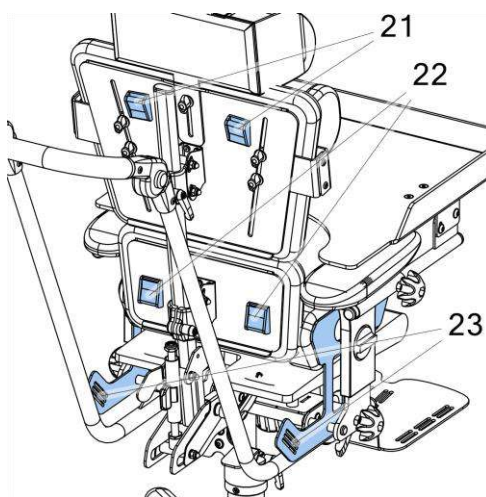


Fig. 15

NOTE! Verificare con precisione che la regolazione sia corretta ed in particolare che:



1. Nessun elemento eserciti una pressione eccessiva sul corpo dell'utente.
2. Non ci sia troppo spazio tra l'utente e il dispositivo.
3. Tutte i bulloni e le manopole di regolazione vengano serrate nuovamente al termine del processo di regolazione.
4. Ci si assicuri che tutte le cinture siano fissate correttamente negli occhielli di fissaggio e che tutte le fibbie del bretellaggio e della cintura pelvica siano fissate correttamente.

12 Pulizia e manutenzione

Il sistema BAFFIN neoSIT BASIC è realizzato in acciaio verniciato, alluminio e plastica. La schiuma e le imbottiture in spugna sono fissate alla struttura metallica e ricoperte in tessuto protettivo. Il dispositivo deve essere mantenuto pulito ed utilizzato in conformità alle raccomandazioni del Fabbricante.

- Il rivestimento deve essere pulito con un panno umido utilizzando eventualmente un detergente delicato.
- Prima del lavaggio è necessario rimuovere le imbottiture in spugna dalle protezioni.
- Il rivestimento dovrebbe essere lavato a mano o in lavatrice ad una temperatura massima di 40° C. Utilizzare esclusivamente detersivi adatti ai tessuti delicati. Se il bambino che utilizza il sistema BAFFIN neoSIT BASIC soffre di allergie, utilizzare un detersivo ecologico o agenti chimici idonei.
- Per eliminare l'acqua in eccesso si può eseguire una centrifuga breve. Non strizzare.
- Asciugatura: le parti che possono essere lavate vanno asciugate all'aria, a temperatura ambiente. Non utilizzare l'asciugatrice.



NOTA! Il rivestimento di questo sistema è realizzato con tessuto traspirante. Il tessuto utilizzato per il rivestimento non contiene sostanze dannose quali pesticidi, cloro fenolo, formaldeide, coloranti allergizzanti, azocoloranti proibiti o metalli pesanti estraibili.



NOTA! Lavando l'imbottitura fare attenzione ai nastri in velcro. Per evitare di danneggiare il rivestimento, assicurarsi che i nastri in velcro siano sciolti e che non siano a contatto con il rivestimento. Non lavare con l'imbottitura all'interno.

Se il dispositivo viene utilizzato da pazienti diversi (ad esempio in un centro di riabilitazione) è necessario utilizzare dei disinfettanti. Per la disinfezione manuale si raccomanda di utilizzare Incidin plus in soluzione dallo 0,25% allo 0,5% o un altro prodotto simile. È necessario seguire le istruzioni per l'applicazione fornite dal produttore del disinfettante.

Consiglio: prima della disinfezione pulire la tappezzeria e le maniglie.

13 Etichetta

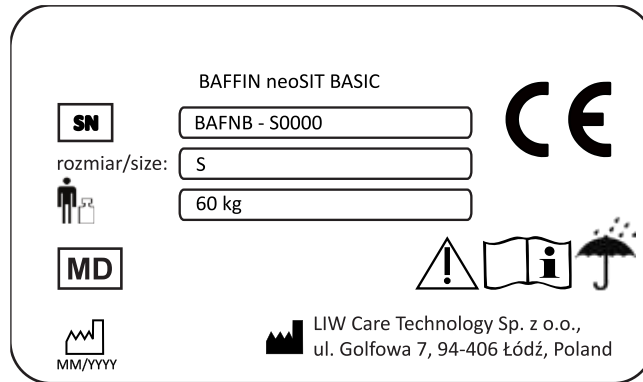


Fig. 16

14 Assistenza e manutenzione

In caso di difetti o danni, non continuare ad utilizzare il dispositivo e contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi che il dispositivo danneggiato non subisca ulteriori danni. Non effettuare tentativi di riparazione individuale dell'apparecchio. Non sostituire le parti originali con parti di ricambio sviluppate individualmente o ottenute da fonti diverse da quelle raccomandate dal produttore.

Il sistema Baffin neoSIT BASIC deve essere controllato periodicamente e attentamente. Un'ispezione generale deve essere eseguita ogni 12 mesi o ogni 6 mesi, in caso di frequente utilizzo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni comporta l'annullamento della garanzia.

- Nel caso l'ausilio venga dismesso, si è obbligati a smaltirlo secondo la normativa per la gestione dei rifiuti.
- Il produttore stabilisce che la durata del prodotto è di 5 anni.
- L'assistenza post-garanzia del dispositivo viene effettuata dal produttore.

Contatti del Servizio di assistenza:

Bodytech S.r.l. – Via Pratolino snc – 19037 Santo Stefano Magra (SP)

www.bodytech.it

email: info@bodytechitalia.it