


# Cinghia Superiore Con Occhielli




ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'USO

ART NOS. SH025-2

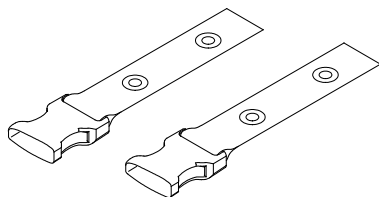



1. Regolare ogni cinghia sulle spalle in modo che sia aderente e comoda adattandola alla larghezza della spalla del paziente e alla sua posizione da seduto. Contrassegnare la posizione delle viti di montaggio per mantenere la posizione.

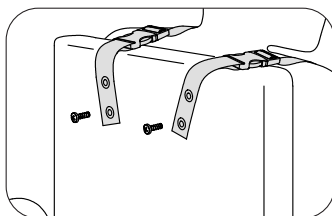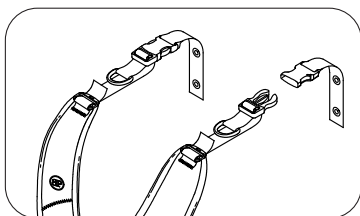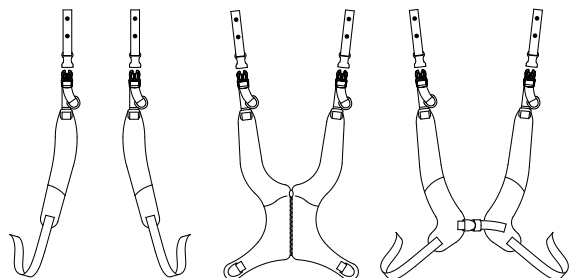

2. Le cinghie di montaggio si possono fissare direttamente alla superficie di uno schienale rigido. Utilizzare unicamente viti a testa piatta o a testa tonda da 6 mm (1/4 poll.) per montare al telaio della sedia o a uno schienale rigido. Le viti di montaggio devono avere una forza minima di estrazione di 90 kg (200 lib.) e non sono incluse nella confezione..



**MANUTENZIONE:** Controllare periodicamente che le cuciture, il tessuto e le imbottiture non siano usurati. Se si rilevano segni di usura, contattare il fornitore per una riparazione qualificata o per la sostituzione da parte della Bodypoint. In nessun caso il prodotto deve essere alterato o riparato da persone non qualificate: ne va della salute e della sicurezza dell'utente!

    **PULIZIA:** Lavare in lavatrice, con acqua caldo, a 60°C (140°F). Non candeggiare. Utilizzare l'asciugatrice a bassa temperatura, oppure appendere e lasciare asciugare. Non stirare. (Collocare

il prodotto all'interno di un sacchetto di stoffa durante il lavaggio, per evitare graffi alla macchina e al prodotto stesso).

**GARANZIA:** Il prodotto è coperto da una garanzia a vita limitatamente a difetti dei materiali e di fabbricazione che sorgano durante il normale impiego da parte del consumatore originale. Per le richieste in garanzia, contattare il proprio fornitore o Bodypoint, Inc.

Per maggiori informazioni su questo o su altri prodotti BodyPoint, e per un elenco di distributori al di fuori degli USA, visitare [www.bodypoint.com](http://www.bodypoint.com)

 **Bodypoint**<sup>®</sup>

**EC REP**

Bodypoint Europe BV  
Kerkstraat 29  
7396 PD Terwolde  
The Netherlands

**CE**