


Kit di montaggio del joystick mediano

E ISTRUZIONI PER L'USO

ART NOS. PC202, PC205, PC206 & PC207

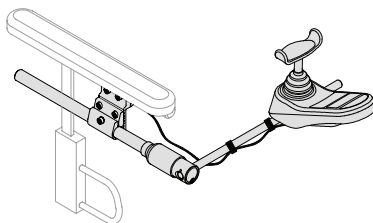

Queste istruzioni forniscono importanti informazioni per l'uso e la manutenzione di tutti i kit di montaggio dei Joystick Bodypoint mediano. Consegnare le istruzioni all'utente o al suo tutore e verificare che le abbiano comprese.

⚠ ATTENZIONE! Prima dell'installazione spegnere l'impianto elettrico della carrozzina.

⚠ ATTENZIONE! Se si verifica un incidente grave correlato all'uso di questo prodotto, deve essere segnalato al produttore (Bodypoint, Inc.) e all'autorità competente locale.

MANUTENZIONE: Per assicurare una rotazione regolare, l'albero rotante PC024 va controllato annualmente per verificare la lubrificazione, facendo scorrere indietro la protezione di gomma (manicotto), come mostrato in queste istruzioni. Applicare una piccola quantità di grasso per cuscinetti PTFE (Teflon) di media viscosità alla scanalatura e far scorrere la protezione di gomma al suo posto. Non è necessaria alcuna manutenzione sugli altri componenti.

CONTROLLI PERIODICI DI SICUREZZA E DI EFFICACIA: Per garantire la sicurezza dell'utente, questo prodotto deve essere controllato periodicamente per verificarne il funzionamento e i segni di usura. Se il prodotto non funziona correttamente o se si riscontra un'usura significativa nelle fibbie, interromperne l'utilizzo e contattare il fornitore per una riparazione da parte di personale qualificato o per la sostituzione da parte di Bodypoint. In nessun caso il prodotto deve essere alterato o riparato da persone non qualificate: ne va della salute e della sicurezza dell'utente!

SCARTO/SMALTIMENTO: Il prodotto è realizzato in materiali che possono essere smaltiti in modo sicuro senza particolari precauzioni al termine della sua vita utile.

GARANZIA: Il prodotto è coperto da una garanzia a vita limitata contro eventuali difetti dei materiali e di fabbricazione che sorgano durante il normale impiego da parte del consumatore originale. Per le richieste in garanzia, contattare il proprio fornitore o Bodypoint, Inc. Per maggiori informazioni sui prodotti Bodypoint, e per avere un elenco di distributori fuori dagli USA, visitare il sito www.bodypoint.com.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

La confezione può contenere uno o più dei seguenti articoli:

- Morsetto di montaggio del Joystick
 - Stelo rotante Tri-Lock™
 - Braccio mediano
 - Adattatore per il montaggio del Joystick
 - Levetta di sgancio rapido (opzionale)
- Oppure un kit completo di montaggio del Joystick. Cod. art.: PC202-, PC205-, PC206-, PC207-



PC042




PC045




PC046




PC047

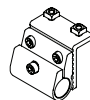

PC010

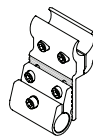

PC011

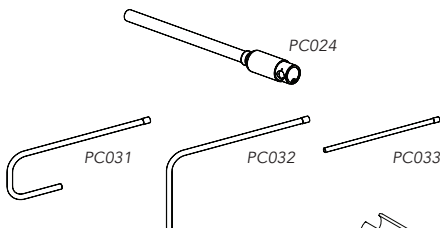

PC024

PC031

PC032

PC033

BP Bodypoint®




Bodypoint Europe BV
Kerkstraat 29
7336 PD Terwolde
The Netherlands



Dispositivo medico




558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

MORSETTO DI MONTAGGIO DEL JOYSTICK



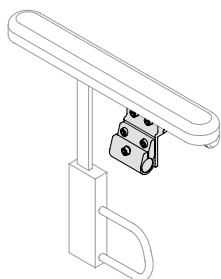


I morsetti di montaggio del Joystick possono essere installati a destra o a sinistra del bracciolo. Fissare il morsetto al bracciolo. Collocare il morsetto in posizione più avanzata possibile e stringere.

Art. No.
FA171


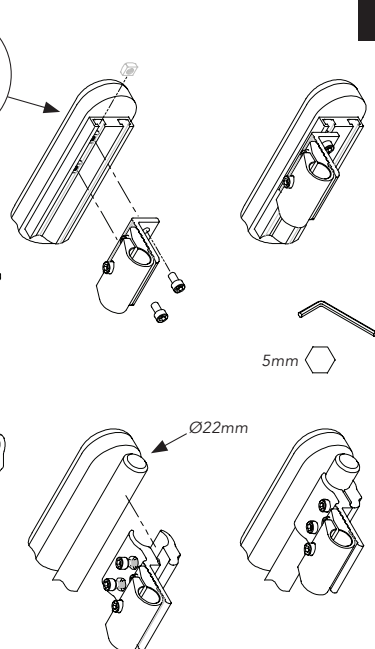
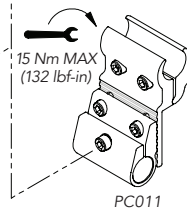
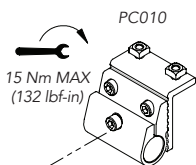


STELO ROTANTE TRI-LOCK™

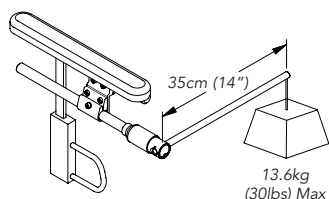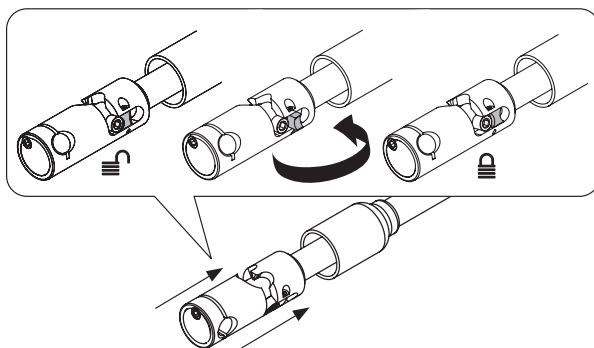
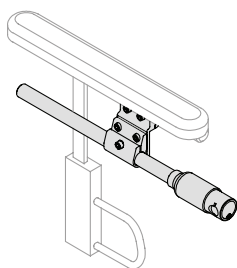


Lo stelo rotante Tri-Lock è adatto al montaggio sul lato destro o sinistro. Ruotare lo stelo nel morsetto di montaggio per garantire posizioni di rotazione corrette.


L'arresto a commutazione consente la conversione dalla posizione di non blocco a quella di blocco. La posizione orizzontale di 0° causa il blocco. Premere l'estremità per sbloccare.

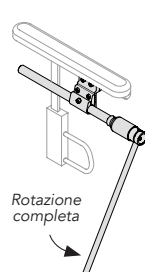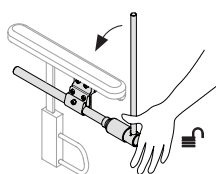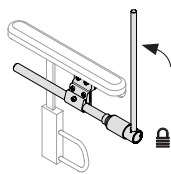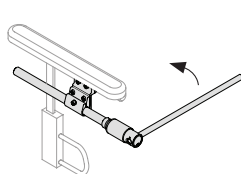

BRACCI MEDIANI

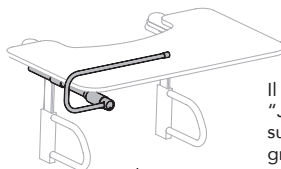
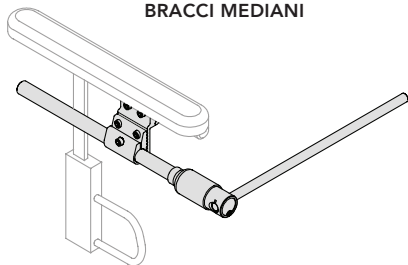


Il braccio mediano a "J" consente l'utilizzo su un vassoio da gambo.

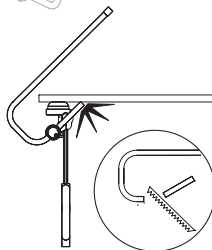

NOTA: il braccio mediano può essere tagliato su misura con un seghetto o un tagliatubi.


ADATTATORI PER IL MONTAGGIO DEI JOYSTICK

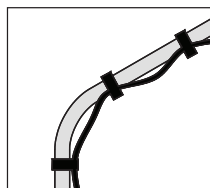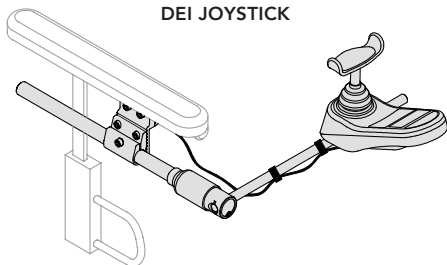

Fissare i fili elettrici sciolti utilizzando le fascette incluse.

INVACARE

Art. No. PC042

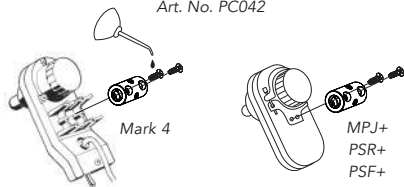


Mark 4

MPJ+
PSR+
PSF+





PGDT R-NET & VSI

Art. No. PC046

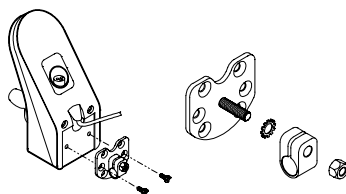

PGDT PILOT PLUS

Art. No. PC045

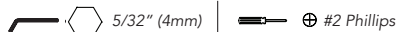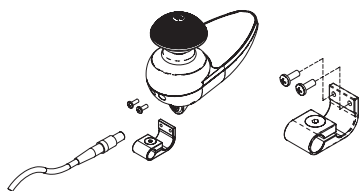

COMPACT JOYSTICKS

Art. No. PC047

