

VARILITE™ : nécessaire de réparation des valves

Mode d'emploi

Ce nécessaire de réparation contient les pièces détachées nécessaires à la réparation d'un article VARILITE.

COMMENT REMPLACER LA VALVE

1. Plongez la valve à remplacer dans l'eau chaude pendant 1 à 2 minutes. Veillez à ne pas mouiller le coussin.
2. Avec une paire de pinces, faites bouger la valve à remplacer de gauche à droite pour créer du jeu et commencer à la sortir, puis tirez-la verticalement pour la dégager du coussin.
3. Appliquez une mince couche de colle autour de l'extrémité crantée de la nouvelle valve.
4. Pressez et vissez la valve dans le coussin jusqu'à ce qu'elle arrive en butée. Nettoyez tout excès de colle.
5. Quand la colle est sèche, laissez le coussin se gonfler et fermez la valve. Plongez le coussin dans l'eau. Si vous notez de fines bulles d'air qui s'échappent, cela signifie que la réparation n'est pas effective. Il vous faut y remédier avant de pouvoir utiliser le coussin.

INFORMATIONS SUR LE FABRICANT ET GARANTIE

Pour obtenir des informations sur la garantie des articles VARILITE, veuillez vous adresser au revendeur ou au distributeur auprès duquel vous avez acheté votre produit.

En cas de problème ou de blessure graves, veuillez signaler l'incident au service clientèle de VARILITE. En outre, si vous résidez dans l'Union européenne, veuillez en informer le fabricant ou le distributeur, ainsi que l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous résidez.



Les informations contenues dans ce manuel peuvent avoir évolué depuis l'impression de ce document. Les informations les plus à jour sont disponibles sur notre site Internet : www.VARILITE.com.



Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134 États-Unis
Téléphone : (800) 827-4548
(n° gratuit en Amérique du Nord)
Fax : (+1)(206) 343-5795
www.VARILITE.com

Kit di riparazione della valvola VARILITE™

Manuale di istruzioni

Questo kit di riparazione contiene le parti necessarie per sostituire la valvola del prodotto VARILITE.

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA

1. Immergere la valvola da sostituire in acqua molto calda per 1-2 minuti, facendo attenzione a non bagnare il cuscino.
2. Usando delle pinze, smuovere la valvola spostandola ripetutamente da un lato all'altro e poi estrarla dal cuscino.
3. Spremere fuori dal tubetto una piccola goccia di adesivo e applicarla attorno all'estremità filettata della nuova valvola.
4. Spingere e avvitare la valvola alloggiandola nel cuscino fino a quando non risulta completamente inserita. Eliminare l'adesivo in eccesso.
5. Quando l'adesivo si è asciugato, lasciar gonfiare completamente il cuscino e chiudere la valvola. Immergere il cuscino in un grande lavandino o in una vasca pieni d'acqua. La fuoriuscita di bollicine indica che la riparazione non ha avuto successo e deve essere ripetuta prima di usare il prodotto.

INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE E SULLA GARANZIA

Per le informazioni sulla garanzia del prodotto VARILITE, consultare il rivenditore o il distributore presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

In caso di grave problema o lesione, notificare l'incidente al servizio alla clientela VARILITE. Inoltre, se si è residenti nell'Unione Europea, si prega di notificare il fabbricante o distributore, nonché l'autorità competente dello Stato membro nel quale si risiede.



Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero essere cambiate dalla data di stampa dello stesso. Le informazioni correnti sono disponibili presso il sito web del fabbricante, all'indirizzo www.VARILITE.com.



Cascade Designs, Inc.
4000 1st Ave South
Seattle, WA 98134, USA
Telefono: +1 800 827-4548
Fax: +1 206 343-5795
www.VARILITE.com