


# **Kit universale di riparazione del cuscino VARILITE™**

## **Manuale di istruzioni**

### **Uso previsto e controindicazioni**

Questo kit di riparazione ha la finalità di riparare piccole perdite nei cuscini dei sistemi di seduta e di supporto della schiena VARILITE.

 **Avvertenza** - Non tentare di riparare il cuscino sopra una riparazione esistente, o più di 10 volte nel corso della vita utile del cuscino stesso.

### **CONTENUTO DEL KIT**

- (2) Toppe di stoffa
- (1) Tubetto di adesivo per la riparazione
- (1) Applicatore di legno
- (2) Salviette imbevute di alcol

### **ISTRUZIONI PER LA RIPARAZIONE DEL CUSCINO**

Leggere queste istruzioni per intero prima di tentare di eseguire la riparazione.

#### **Che cosa occorre per riparare il cuscino VARILITE®**

- Un kit universale di riparazione VARILITE
- Un modo per contrassegnare l'ubicazione della perdita (pennarello o penna)
- Forbici (opzionali, per tagliare a misura le toppe)

#### **Individuazione delle perdite**

Se l'ubicazione della perdita non è ovvia, aprire la valvola e lasciar gonfiare il cuscino il più possibile. Chiudere la valvola per impedire che l'acqua possa contaminare la spugna. Immergere il cuscino nell'acqua; le bollicine che fuoriescono dal cuscino indicano l'ubicazione della puntura. Contrassegnare l'ubicazione della perdita con una penna o un pennarello, risciacquare l'area e asciugare bene il cuscino prima di procedere alla riparazione.


#### **Riparazione del cuscino**

1. Pulire l'area da riparare. Appoggiare il cuscino su una superficie piana, con la valvola aperta. Usando una salvietta imbevuta d'alcol (in dotazione) pulire accuratamente un'ampia area attorno alla puntura. Lasciare asciugare completamente.
2. Selezionare la toppa. Assicurarsi che la toppa copra e si estenda oltre la puntura di almeno 3,5 cm (1 e 3/8 di pollice) in ogni direzione.
3. Applicare l'adesivo per riparazione direttamente sulla puntura. Servendosi dell'applicatore di legno, spalmare bene l'adesivo nella stoffa, fino ad ottenere uno strato sottile e uniforme che si estenda di 2,5 cm (1 pollice) oltre la puntura. Assicurarsi che lo strato di adesivo copra completamente la puntura e lasciarlo indurire per 10-20 minuti, o fino a quando l'adesivo si sia asciugato ma risulti appiccicoso.
4. Staccare dalla toppa il rivestimento posteriore. Centrare la toppa sopra la puntura e disporla delicatamente sopra l'area della riparazione, assicurandosi che si estenda di 1 cm (3/8 di pollice) oltre l'area coperta di adesivo.
5. Applicare la toppa. Premere la toppa con fermezza con il palmo della mano per assicurare la migliore adesione possibile.
6. Lasciare il cuscino indisturbato. Il cuscino sarà di nuovo pronto all'uso dopo che lo si sarà lasciato indisturbato, con la valvola aperta, per almeno 3 ore.
7. Dopo che l'adesivo si è asciugato, prima di riprendere l'uso del prodotto eseguire un'altra ispezione visiva e un'altra prova a immersione per assicurarsi che la perdita sia stata effettivamente riparata.

### **INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE E SULLA GARANZIA**

Per le informazioni sulla garanzia del prodotto VARILITE, consultare il rivenditore o il distributore presso il quale è stato effettuato l'acquisto.

In caso di grave problema o lesione, notificare l'incidente al servizio alla clientela VARILITE. Inoltre, se si è residenti nell'Unione Europea, si prega di notificare il fabbricante o distributore, nonché l'autorità competente dello Stato membro nel quale si risiede.

 Le informazioni contenute in questo manuale potrebbero essere cambiate dalla data di stampa dello stesso. Le informazioni correnti sono disponibili presso il sito web del fabbricante, all'indirizzo [www.VARILITE.com](http://www.VARILITE.com).



Cascade Designs, Inc.  
4000 1st Ave South  
Seattle, WA 98134, USA  
Telefono: +1 800 827-4548  
Fax: +1 206 343-5795  
[www.VARILITE.com](http://www.VARILITE.com)