



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I CONSUMATORI

AVVISO: Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso con i prodotti per cuscini Blake Medical. Queste informazioni devono essere trasmesse all'utente di questo prodotto. Si prega di non rimuovere questo manuale prima della consegna all'utente finale.

FORNITORE: Questo manuale deve essere consegnato all'utente di questo prodotto al momento della sua consegna o installazione.

UTENTE: Prima di utilizzare questo prodotto, leggere l'intero manuale e conservarlo per riferimento futuro.

Sicurezza generale dei prodotti

L'applicazione sicura di questo prodotto dipende dal buon senso e dal buon senso, nonché da quello del medico, del caregiver e/o dell'operatore sanitario e dall'attenzione nel seguire le avvertenze, le note e le istruzioni contenute in questo manuale.

NOTA: Abbiamo compilato questo manuale in base alle specifiche e alle informazioni sul prodotto più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche qualora si rendessero necessarie. Eventuali modifiche ai nostri prodotti possono causare lievi variazioni tra le illustrazioni e le spiegazioni in questo manuale e il prodotto acquistato. Contattare sempre il fornitore, il distributore o il blakemedical.ca autorizzato Blake Medical più vicino per la letteratura e le informazioni più recenti.

ATTENZIONE: La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni al prodotto o lesioni all'utente. Si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

Non installare questa apparecchiatura senza aver prima letto e compreso questo manuale. Se non si è in grado di comprendere le avvertenze, le precauzioni e/o le istruzioni, contattare un medico o un fornitore qualificato.

1. AVVERTIMENTO

L'installazione di un cuscino su una sedia a rotelle può influire sul baricentro della sedia a rotelle. Se installato in modo errato, potrebbe causare il ribaltamento all'indietro della sedia a rotelle, con conseguenti lesioni. Valutare sempre se può essere necessaria l'aggiunta di antiribaltamento e/o di eventuali dispositivi di stabilizzazione aggiuntivi della sedia a rotelle per aumentare la stabilità dopo l'aggiunta di un cuscino.

2. AVVERTIMENTO

Tutti i supporti per la schiena e i cuscini Blake Medical sono progettati per aiutare a ridurre l'incidenza di lesioni da pressione. Tuttavia, nessun supporto per la schiena o cuscino può eliminare completamente la pressione della seduta o prevenire lesioni da pressione. I supporti per la schiena e i cuscini Blake Medical non sostituiscono una buona cura della pelle, tra cui una dieta corretta, la pulizia e le tecniche regolari di sollievo dalla pressione.

AVVISO - LEGGERE PRIMA DELL'USO

3. AVVERTENZA Il coccige e le ossa pelviche non devono toccare il fondo del cuscino. Il controllo del "bottoming out" deve essere effettuato durante il primo utilizzo e dopo qualsiasi modifica delle condizioni dell'utente (ad esempio, eccessiva perdita di peso, eccessivo aumento di peso, degenza ospedaliera prolungata, ecc..).

4. Attenzione! Controlla regolarmente la tua pelle per arrossamenti, soprattutto durante i primi giorni. Se l'arrossamento si verifica e non scompare dopo 15 minuti, consultare il terapeuta o il professionista delle tecnologie assistive.

5. AVVERTENZA Assicurarsi che il velcro® sia innestato e in grado di tenere il cuscino in posizione.

6. AVVERTENZA Evitare di utilizzare il cuscino su un'imbottitura del sedile eccessivamente tesa. L'imbottitura tesa non fornisce un supporto adeguato per il cuscino e potrebbe verificarsi un posizionamento improprio. Sostituisci l'imbottitura allungata o aggiungi un inserto per sedile solido alla base del cuscino.

7. Attenzione! In caso di sporco di fluidi corporei, e in caso di trasferimento del prodotto ad un altro utente, il prodotto deve essere disinfettato per evitare la contaminazione incrociata. *Nota: i componenti in schiuma possono essere difficili da disinfettare a fondo. *



PROTEGGI IL TUO CUSCINO

AVVERTIMENTO

Evitare sempre di esporre il cuscino a calore eccessivo o fiamme libere. I materiali dei cuscini Blake Medical funzionano in modo ottimale a temperatura ambiente.

AVVERTIMENTO

Lasciare sempre che il cuscino Blake Medical raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso. Sedersi su superfici eccessivamente calde o fredde può causare danni alla pelle.

OSTRUZIONI

AVVERTIMENTO

Assicurati che non ci siano mai ostacoli tra te e il cuscino. Qualsiasi ostruzione ridurrà l'efficacia del prodotto e/o produrrà punti di pressione non necessari per l'utente.

ORIENTAMENTO DEL COPERCHIO

AVVERTIMENTO

Il prodotto deve essere utilizzato con la fodera del cuscino rivolta verso l'alto. Se la fodera non viene utilizzata correttamente, potrebbe ridurre o eliminare i benefici del cuscino e potrebbe aumentare il rischio di lesioni alla pelle e ai tessuti molli.

Istruzioni per l'installazione:

Controllare le dimensioni del cuscino. La larghezza del cuscino e del sedile deve corrispondere. Quando il cuscino poggia contro i braccioli o le protezioni laterali, la larghezza può arrivare fino a

2,5 cm (1") più largo. La profondità del cuscino può superare quella del sedile di circa 2,5 cm (1")

Controllare che le dimensioni della fodera corrispondano a quelle del cuscino.

Rimuovere il nastro protettivo di supporto dalle strisce di gancio autoadesive attaccate alla parte inferiore del cuscino.

Posizionare il cuscino sul sedile assicurandosi che il logo Blake sia visualizzato nella parte anteriore sinistra.

Dopo alcuni minuti di utilizzo, assicurarsi che i supporti per i piedi siano posizionati correttamente per garantire una distribuzione sufficiente del peso su tutta la parte anteriore del cuscino.



EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands



blakemedical.ca/resources/



Min. 15 kg
Max. 125 kg



Min. -20°C
Max. 55°C



+ 2.400 m
- 50 m



Min. 0%
Max. 100%

